



ŁÓŻKO PIONIZACYJNE JK-L3P

INSTRUKCJA OBSŁUGI

A Regulacja poszczególnych funkcji łóżka – gdy prawa dioda nie świeci, włączona jest blokada funkcji

1. Zdejmij blokadę w pilocie tak by prawa dioda zmieniła kolor na pomarańczowy.
2. Wybierz odpowiedni piktogram na pilocie i ustaw żądaną pozycję z czterech górny rzędów klawiszy.

Uwaga:

Do uruchomienia siłownika służącego do pionizacji służy piąty rząd klawiszy, dla jego uruchomienia należy dwukrotnie zdjąć blokadę w pilocie tak by prawa dioda zmieniła kolor na zielony.

Pionizować tylko w obecności przeszkolonego personelu.



B Pionizacja

1. Odjedź łóżkiem od ściany.
2. Sprawdź czy w otoczeniu łóżka nie znajdują się przedmioty lub rzeczy które przeszkodzą w trakcie pionizacji.
3. Zablokuj dźwignią zespół jezdny.
4. Podnieś łóżko do najwyższej pozycji.
5. Opuść do pozycji płaskiej wszystkie sekcje leża.
6. Opuść do pozycji płaskiej lub zablokuj w pozycji podniesionej barierki boczne.
7. Zsuń pacjenta tak aby przy wyprostowanych kolanach stopy dotykały podnóżka.
8. Przewiąż pasy na odpowiedniej wysokości za ramki w ruchomych segmentach łóżka.
9. Wyreguluj długość pasów do rozmiarów pacjenta i zatrzaśnij pasy.
10. Zdejmij dwukrotnie blokadę pilota.
11. Rozpocznij pionizację używając piątego rzędu klawiszy.

Uwaga:

W trakcie pionizacji zabrania się używania innych regulacji elektrycznych niż pionizacja.

Nie należy zwalniać dźwigni hamulca z pozycji zablokowanej.

Pionizować należy tylko i wyłącznie na podłożu płaskim.

Uważnie obserwować zachowanie pacjenta, w przypadku nienaturalnego zachowania pacjenta lub omdlenia natychmiast opuścić leże do pozycji poziomej.



C Przetaczanie łóżka

1. Pacjenta należy przetaczać głową do kierunku jazdy.
2. Dla łatwiejszego manewrowania należy podnieść dźwignię hamulca do góry w pozycję jazdy na wprost.
3. W trakcie przetaczania łóżka zaleca się opuszczenie leża do najniższej pozycji.
4. W trakcie przetaczania łóżka należy podnieść barierki w celu zabezpieczenia pacjenta.

Zalecenia użytkowe

W celu wydłużenia żywotności akumulatora i zachowania bezpieczeństwa pacjenta łóżko powinno być podłączone jak najczęściej do gniazda sieciowego 230V.

Zaleca się pozostawianie łóżka w najniższej lub najwyższej pozycji leża.